

Kā veikt Covid-19 antigēna ātro paštestu SARS-CoV-2 Ag noteikšanai ?



1. Pirms testa veikšanas rūpīgi nomazgā vai dezinficē rokas.




2. Atver testa komplekta maisiņu un izvieto sev priekšā tajā atrodošos priekšmetus.



3. Vispirms atver testēšanas kasetes iepakojumu. Kaseti novieto sev priekšā.




4. Daļēji atver sterilo uztriepes tampona iepakojumu un nedaudz pavelc uz āru, lai pēc tam to ērti vari paņemt.

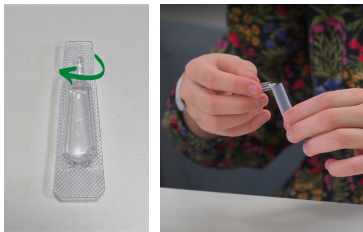

5. Atver speciālo šķidruma ampulu un uzmanīgi pārlej tās saturu testa savākšanas caurulē.



6. Ar brīvo roku paņem sterilo uztriepes tamponu un ievietojot to vienā nāsī, ne dziļāk un ne mazāk par diviem cm, līdz sajūti pretestību nāsī. Pagrozi uztriepes tamponu 5 līdz 10 reizes. Izmantojot to pašu tamponu atkārtoti darbību arī otrā nāsī.

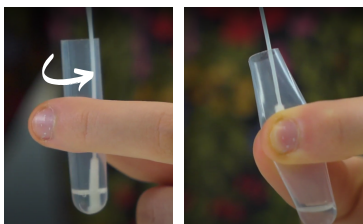


7. Kad esi abās deguna nāsīs atkārtojis uztriepes tampona grozīšanu ievieto to testa savākšanas caurulē, kurā ielēji speciālo šķidrumu. Virpinot kārtīgi izmērcē tamponu 10 sekundes. Tad ar diviem pirkstiem saspied cauruli, lai no tampona izspiestu visu šķidrumu.



8. Caurulei uzliec cieši vāciņu un testēšanas kasetes lauciņā, kas apzīmēts ar burtu "S" iespied **3** pilienus.

Testa rezultāts nolasāms pēc 15 minūtēm, bet ne vēlāk par 20 minūtēm.

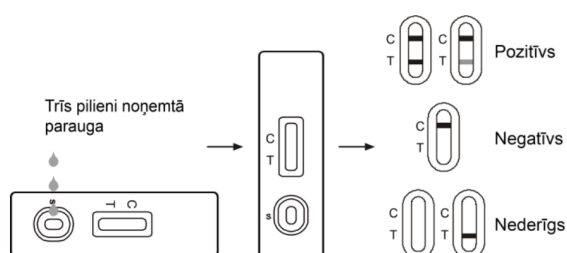

9. Ja testēšanas kasetē redzi iekrāsojamies divas strīpiņas gan pie burta C, gan T testa rezultāts ir pozitīvs. Ja iekrāsojas pie burta C, testa rezultāts ir negatīvs, ja testa neiekrāsojas neviena strīpiņa, vai tā parādās pie burta T, tests ir nederīgs.

Ja tests ir pozitīvs, tad saskaņā ar SPKC izdotu algoritmu, veic apstiprinošu testu laboratorijā.

Visus izlietotos priekšmetus ievieto maisiņā utilizācijai.